

사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 환자의 코에서 귀의 끝까지 오는 길이에, 환자의 비공보다 작은 직경의 제품을 선택한다.
- 2) 포장과 제품에 이상이 없는지 확인한다.
- 3) 환자와 시술자를 위한 기본적인 예방조치를 한다.(눈 보호, 마스크, 장갑 착용 등)
- 4) 환자 비공의 막힘이나 골절 여부를 체크한다.

나. 사용방법



- 1) 포장을 개봉하고 제품의 삽입이 원활하게 이루어지도록 제품 겉으로 수용성윤활제를 발라주되 내부가 막히지 않도록 주의한다.
(*수용성윤활제: 병원에서 일반적으로 사용하는 제품으로 본 제품에는 포함되지 않은 별도의 제품임.)



- 2) 그림과 같이 한 곳의 비공을 선택하여 안으로 제품을 천천히 넣어주고 기도를 확보할 수 있도록 위치시킨다. 삽입에 어려움이 있을 시, 제품을 빼내어 반대편 비공으로 삽입한다.
- 3) 튜브의 끝에 연결되어 있는 커넥터 부분이 코 바깥쪽에 걸쳐있도록 제품을 위치시킨다.

다. 사용 후 보관방법

- 1) 일회용 의료기기이므로 사용 후, 지정된 수거용기에 폐기한다.
- 2) 본 제품은 49°C 이하에서 직사광선을 피하여 보관한다.

사용시 주의사항

가. 사용시 주의사항

- 1) 환자가 두개골 손상이 있는 경우, 튜브가 삽입 될 수도 있으므로 사용하지 않는다.
- 2) 식도로 삽입될 시, 환자의 구토를 유발할 수 있으므로 이를 주의하여 기도로 삽입한다.
- 3) 지나치게 긴 튜브는 식도를 지날 수 있으며 이 경우, 폐포저환기 증후군이나 위의 팽창을 유발할 수 있으므로 주의한다.
- 4) 과한 삽입으로 코에 출혈이 나지 않도록 주의한다.
- 5) 일회용 멸균제품이므로 재사용을 금지한다.
- 6) 제품이 얼거나 과열되는 것을 피한다. 49°C이상의 온도에 노출시키지 않는다.
- 7) 튜브가 구부러지거나 막히지 않게 주의한다.
- 8) 이 제품을 적절히 사용할 수 있도록 교육을 받은 사람에 의해 사용되어야 한다.
- 9) 제품의 사이즈는 전문가의 판단에 의해 결정되어야 한다.
- 10) 본 제품에는 DEHP를 첨가한 PVC가 사용됨.

저장방법

가. 저장방법

Blister Pack 으로 포장된 밀봉의 상태로, 직사광선을 피하여 상온의 깨끗하고 건조한 곳에서 보관한다. (49°C이상의 온도에는 노출시키지 않는다.)

나. 포장방법

Blister Pack(종이 파우치와 플라스틱 필름)을 이용하여 개별 포장.

사용기한

제조일로부터 5년.

※ 부작용 보고 관련 문의처

한국의료기기안전정보원, 080-080-4183