

의약품압력주입기



상품정보

명칭 : 의약품압력주입기
모델명 : M10101 (500ml), M10145 (1000ml)

제품개요

환자에 투여되는 용액 및 혈액 용기가 적당한 압력을 받아 투여 될 수 있도록 용액 및 혈액 용기를 감싸도록 설치하여 압력을 가하는 장치이다.

사용목적

커프를 아이브이(I.V.) 백 주위에 감아 공기 압력을 줌으로써 주사액의 주입을 도와주는 기구

제품 이미지



제품특성

1. IV 용량에 따라 500ml와 1000ml 중에 선택하여 사용 가능하다.
2. 파우치의 내구성이 강하고 투명하여 안의 주입 액의 용량 확인이 용이하다.
3. 큰 사이즈의 게이지가 달려있어 압력 확인이 용이하다.



	명칭	기능
A	게이지	공기 주입 시 또는 사용 시에 게이지를 통하여 적정 압력을 확인한다.
B	파우치	IV 용량에 따라 크기를 선택하여 IV백을 넣을 수 있다
C	주입 밸브	공기를 주입하여 파우치에 압력을 가한다
D	튜브	주입 밸브와 파우치를 연결하여 파우치로 공기가 주입되도록 한다.

모델명	파우치크기 (가로*세로) (mm)	파우치밴드 (가로*세로) (mm)	용량 (ml)	튜브길이 (mm)	압력	게이지 크기	비고
M10101	320*210	410*60	500	540	300mmHg 이하	2.5"	파우치 투명
M10145	330*315	476*138	1000	540	300mmHg 이하	2.5"	파우치 투명

준비사항

1. 사용 전 물품의 포장과 제품의 이상 유무를 확인한다.
2. 의약품의 용량에 따라 적절한 크기의 기구를 선택한다.
3. 사용 전 주입 밸브와 튜브의 연결 상태를 확인하도록 한다.
4. 이 기구를 적절히 사용할 수 있도록 교육 받은 사람에 의해 사용되어야 한다.

사용방법

1. 파우치에 공기가 남아있다면 밸브를 이용하여 공기를 빼준다.
2. 주입해야 할 의약품 백을 주입기 안의 고리에 걸어 위치시키고 주입기로 잘 감싸 위치를 고정시킨다.
3. 3방향 조절 밸브가 밸브와 튜브를 연결하도록 조절하여 공기 주입 방향을 확인하고 손으로 주입 밸브를 눌러 필요한 만큼의 압력을 준다.
4. 사용 중에는 주기적으로 압력 게이지를 통해 압력을 확인하도록 한다.
5. 압력이 낮아진 경우에는 필요에 따라 주입 밸브로 다시 압력을 높여준다.
6. 사용 후에는 조절 밸브를 이용하여 공기가 나오도록 하여 압력을 풀어주고 남은 공기는 파우치를 눌러 빼준다.

보관 및 관리

1. 사용 후에는 다음 사용을 위하여 깨끗하게 닦아서 보관한다.
2. 제품에 손상이 가지 않도록 유의하여 보관한다.
 - . 보관방법: 실온보관
 - . 비 멸균 제품
 - . 유효기간: 3년

주의사항

1. 사용 전 포장과 제품에 이상이 있다면 사용하지 않아야 한다.
2. 적절한 크기의 기구를 선택한다.
3. 이 기구를 적절히 사용할 수 있도록 교육 받은 사람에 의해 사용되어야 한다.
4. 주입 압력은 300mmHg를 넘지 않도록 한다.
5. 사용 중에는 주기적으로 압력 게이지를 통해 압력을 확인하도록 한다.

제조사

Pacific Hospital Supplies(대만)